

LUVA PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE LÁTEX SUPREME, COM PÓ

Anvisa nº:

80495519113 (CA MTE 51017)

Modelos

6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5

Indicação de uso

As Luvas para procedimentos cirúrgicos, com pó, foram desenvolvidas para proteção de pacientes e profissionais de saúde para proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais, contato com mucosas e pele não íntegra de pacientes, reduzir a possibilidade de transmissão de micro-organismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato, prevenir a contaminação cruzada onde haja risco de contaminação por patógenos, promovendo uma barreira passiva contra agentes biológicos em procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos realizados em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas.

Especificação técnica

Fabricada em 100% látex de borracha natural;

Estéril por óxido de etileno;

Com pó bioabsorvível;

Texturizada;

Anatômica;

Punho com bainha

Espessura: 0,15mm

Tamanhos: 6,0 / 6,5 / 7,0 / 7,5 / 8,0 / 8,5;

Comprimento: 280mm

Cor: Natural;

Apirogênica;

Validade 5 anos após data de esterilização

Descartável e de uso único

Apresentação

Embalagem primária: 1 par embalado em papel grau cirúrgico com filme plástico, com dobras para abertura asséptica, com indicação da mão direita e esquerda, com punhos e polegares dobrados adequadamente, de forma a facilitar o calçamento sem contaminar.

Embalagem secundária: cartucho de papelão contendo 50 pares.

Embalagem de transporte: caixa de papelão box, contendo 10 cartuchos com 50 pares cada.

Orientações de Uso

- 1) Verificar a integridade da embalagem e o tamanho adequado conforme indicação;
- 2) Realizar a higiene das mãos;
- 3) Retirar a luva da embalagem o mais próximo possível do momento de seu uso;
- 4) Calçar a luva cuidadosamente, sem anéis, pulseiras, relógios ou outros acessórios que possam perfurar a luva;
- 5) Realizar o procedimento, seguindo atentamente os "meus 5 momentos para higiene das mãos"
- 6) Após o uso, retirar a luva, descartando-a imediatamente em local adequado;
- 7) Realizar a higiene das mãos;
- 8) Não reutilizar ou esterilizar a luva após o seu uso. PROIBIDO REPROCESSAR.

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

“ESTE PRODUTO CONTÉM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL. SEU USO PODE CAUSAR REAÇÕES ALÉRGICAS EM PESSOAS SENSÍVEIS AO LÁTEX”; “PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “ESTÉRIL”

Ler atentamente as Instruções de Uso;

Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem;

Descartar e não usar luvas previamente abertas ou danificadas;

Após higiene das mãos calçar as luvas com as mãos secas;

Caso ocorra irritação, o uso deverá ser descontinuado. Persistindo os sintomas, consulte um médico;

Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar;

Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade.

Armazenamento e Transporte

Conforme determinação da RDC 665/2022 (Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saúde), as condições de armazenamento e distribuição dos materiais são preestabelecidas pelos fabricantes. Os produtos deverão ser armazenados em condições físicas e ambientais que previnam danos, deterioração ou outros efeitos adversos durante o período de armazenamento e/ou transporte. O ambiente adequado para armazenamento dos produtos precisa ser seco e arejado, sem exposição direta ao sol, a temperatura não deve ser superior a 40°C e umidade deve estar entre 40% a 70%. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, onde deve-se evitar a exposição direta dos produtos aos efeitos do calor excessivo e chuva, bem como atentar-se a quantidade máxima de empilhamento. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto.

Normas técnicas

RDC Nº 185 de 22.10.2001

ISO 13485:2016

RDC Nº 665 de 30 de março de 2022

RDC 751/2022

ISO 13485:2016

RDC Nº 825 DE 26/10/2023;

PORTARIA MTP Nº 672 DE 08/11/2021;

RDC Nº 37 DE 26/08/2015;

PORTARIA NR6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI;

ABNT NBR ISO 10282:2014 - LUVAS CIRÚRGICAS DE BORRACHA, ESTÉREIS OU A SEREM ESTERILIZADAS, DE USO ÚNICO.

Códigos de Barra

EAN13

7898652379536 – 6.0

7898652379543 – 6.5

7898652379550 – 7.0

7898652379567 – 7.5

7898652379574 – 8.0

7898652379581 – 8.5

EAN14

17898652379533

17898652379540

17898652379557

17898652379564

17898652379571

17898652379588

Importado e distribuído por:

Medix Brasil LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 – Centro | 85812-010 | Cascavel/PR

☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 – Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC

☎ (47) 3432-8741

Imagens meramente ilustrativas:



Sede Administrativa

📍 Rua Paraná, 1791 - Centro | 85812-010 | Cascavel/PR
☎ (45) 3039-4242

Centro de Distribuição

📍 Rod. SC 417, 10535 - Barracão 1 a 4 | 89248-000 | Garuva/SC
☎ (47) 3432-8741