



FICHA TÉCNICA PROFISEPT® PRÉ-CLEANER - PROFILÁTICA

Data: 13/06/2022

Revisão: 01

Página 1 de 3

1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E QUÍMICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
pH do produto puro	9,0 – 10,50
Densidade (g/ml 20°C)	0,980 – 1,025
Aspecto	Líquido
Cor	Transparente
Odor	Característico

2 COMPOSIÇÃO

Alquilamina, tensoativo não iônico, umectante, acidificante e veículo.

3 CAMPO DE APLICAÇÃO

ASSISTÊNCIA À SAÚDE.

DETERGENTE DE USO ESPECÍFICO UMECTAÇÃO.

PRÉ-LIMPEZA DE PRODUTOS PARA SAÚDE.

4 VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- PROFISEPT® PRÉ-CLEANER é um produto umectante que previne a secagem de matéria orgânica sobre produtos para a saúde, instrumentais médicos e odontológicos, prevenindo a aderência de sujidade orgânica e carga biológica;
- Com formulação exclusiva, baseada na Tecnologia Triamina, PROFISEPT® PRÉ-CLEANER permite a umectação/pré-limpeza de instrumentais, tornando-se a solução de umectação ideal para produtos para a saúde sujos e contaminados durante transporte ou quando deixados em cuba após procedimentos com pacientes antes de seguirem para o processo de limpeza;
- Indicação: Perfeito para ser utilizado sobre instrumentais, após procedimentos cirúrgicos, em salas cirúrgicas, ambulatorios, clínicas médicas e odontológicos e outros departamentos onde os instrumentos precisam ser mantidos úmidos e livres de microrganismos.

5 MODO DE USO

Solução pronta para uso (usar sem diluir):

1. Agite levemente antes de usar;
2. Aplique o produto sobre os instrumentais (PPS) certificando-se da total umectação dos mesmos;



FICHA TÉCNICA
PROFISEPT® PRÉ-CLEANER - PROFILÁTICA

Página 2 de 3

Data: 13/06/2022

Revisão: 01

3. Deixe o produto agindo sobre os instrumentos até que sejam removidos para a limpeza;
4. Antes do processo de limpeza, enxaguar os materiais previamente umectados para remoção de resíduos ainda presentes nos materiais.

6 RISCOS

Não misturar com outros produtos. Incompatível com aldeídos.

7 ELEMENTOS DE ROTULAGEM

CONSERVAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E DE ANIMAIS DOMÉSTICOS.

PRODUTO DE USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL.

PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO.

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE USAR O PRODUTO.

8 PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Usar equipamento de proteção individual (avental, luvas, máscara e óculos de proteção) ao manusear o produto. Não ingerir. Não aplicar sobre as pessoas, alimentos e animais. Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente levando a embalagem ou o rótulo do produto. Não dê nada via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos, se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou rótulo do produto. Não misturar com outros produtos. Não reutilizar as embalagens. Lave os objetos ou utensílios usados como medida antes de reutilizá-los.

Centro de Intoxicações (CEATOX) 0800-722-6001.

9 ARMAZENAGEM

Manter o produto em embalagem original, em lugar fresco e protegido da luz solar direta.

10 PRAZO DE VALIDADE

2 anos.

11 EMBALAGEM

Embalagem primária: Frasco Spray 1L

Embalagem secundária: Caixa de papelão, contendo 6 frascos de 1L = 6 L.



FICHA TÉCNICA
PROFISEPT® PRÉ-CLEANER - PROFILÁTICA

Página 3 de 3

Data: 13/06/2022

Revisão: 01

12 INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Aut. Func. /M.S. 3.02.430-3

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, Nº 25351.130072/2022-45