

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA		
CNPJ	01.057.428/0001-33	Autorização	
Produto	LÂMINA DE BISTURI EM CARBONO DESCARTÁVEL DESCARPACK		

Filtrar...

Modelo Produto Médico

0721215 - Lâmina de Bisturi em Carbono N° 36 Descartável Descarpack

0721201 - Lâmina de Bisturi em Carbono N° 10 Descartável Descarpack

0721202 - Lâmina de Bisturi em Carbono N° 10A Descartável Descarpack

0721203 - Lâmina de Bisturi em Carbono N° 11 Descartável Descarpack

0721204 - Lâmina de Bisturi em Carbono N° 12 Descartável Descarpack

0721205 - Lâmina de Bisturi em Carbono N° 14 Descartável Descarpack

0721206 - Lâmina de Bisturi em Carbono N° 15 Descartável Descarpack

0721207 - Lâmina de Bisturi em Carbono N° 15C Descartável Descarpack

0721208 - Lâmina de Bisturi em Carbono N° 18 Descartável Descarpack

0721209 - Lâmina de Bisturi em Carbono N° 20 Descartável Descarpack

« 1 2 »

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Instruções de Uso - Lâmina de Bisturi em Carb. - rev00.pdf	1214379/21-4 - 30/03/2021 - 10:32

Nome Técnico	Laminas de Bisturi Descartaveis
Registro	10330660276
Processo	25351.637337/2019-36

Fabricante Legal	FABRICANTE: SUZHOU KYUAN MEDICAL APPARATUS CO., LTD. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Exportar para ExcelExportar para PDFVoltar	

DADOS TÉCNICOS

- Confeccionada em aço carbono;
- Estéril;
- Projetada para realizar o encaixe perfeito como cabos de bisturi;
- Proporciona conforto e segurança durante sua utilização;
- Possuem fio extremamente afiado, assegurando incisões precisas e estáveis;
- Resistentes a corrosão;
- Embaladas individualmente em embalagem aluminizada termosselada;
- A Lâmina de Bisturi Descartável Descarpack é indicada para a utilização unida a um cabo de bisturi em procedimentos médico cirúrgicos, curativos e demais procedimentos médicos que necessitem de incisões no paciente.

MODELOS DISPONÍVEIS

Tamanho

Nº 10

Nº 11

Nº 12

Nº 15

Nº 20

Nº 21

Nº 22

Nº 23

Nº 24

MODELOS CADASTRADOS

Tamanho

Nº 10

Nº 10A

Nº 11

Nº 12

Nº 14

Nº 15

Nº 15C

Nº 18

Nº 20

Nº 21

Nº 22

Nº 23

Nº 24

Nº 25

Nº 36

INSTRUÇÕES DE USO

1. Realizar a assepsia das mãos;
2. Calçar as Luvas antes de iniciar o procedimento;
3. Abrir a embalagem da Lâmina de Bisturi em Aço Carbono Descartável Descarpack de forma asséptica;
4. Encaixar a Lâmina de Bisturi em Aço Carbono Descartável Descarpack no cabo de bisturi com o auxílio de uma pinça estéril;
5. Realizar o procedimento conforme definido pelo profissional.
6. Atenção: A utilização inadequada ou por profissionais não qualificados poderá acarretar danos irreversíveis.
7. Ao final do procedimento, desencaixar a Lâmina do cabo do bisturi com o auxílio de uma pinça. O profissional de saúde deverá segurar a pinça na parte superior da lâmina e puxá-la, desencaixando-a do cabo;

8. O descarte deve ser realizado em local adequado apropriado para descarte de materiais perfurantes ou cortantes, de acordo com os procedimentos internos da instituição.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Verificar cuidadosamente a integridade de cada embalagem primária antes do uso;
- Não utilizar caso a embalagem primária esteja violada;
- Produto esterilizado com Radiação gama;
- Proibido reprocessar;
- Produto médico-hospitalar de uso único;
- Validade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada;
- Após o uso descartar em local apropriado.

CONTRAINDICAÇÕES

Não aplicável.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Não informamos métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de reprocessamento proibido de acordo com a RE nº 2605/2006. O descarte deste

produto deve ser feito imediatamente após a utilização. Sugere-se o descarte do produto em recipiente próprio para perfurocortantes (grupo E de acordo com a RDC 222/2018).

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Fabricante Responsável: Suzhou Kyuan Medical Apparatus Co., Ltd.

Importado e Distribuído por: Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda

Notificação Anvisa: 10330660276

Responsável Técnica: Indianara D. Zanelato Joiozo – CRF/SP: 92269

Linha Hospitalar

Linha Hospitalar | Farma

Lâmina de Bisturi em Aço Carbono Descarpac

Desenvolvida para ser utilizada unida a um cabo de bisturi em procedimentos médico cirúrgicos e demais procedimentos médicos que necessitem de incisões no paciente.

- Fabricada em aço carbono T10
- Estéril
- Atóxico e apirogênico
- Fio extremamente afiado
- Resistente a corrosão
- Encaixe perfeito com os cabos de bisturi
- Embaladas unitariamente em uma embalagem aluminizada
- Descartável e de uso único



Tamanho	Código	Quant. por Cartucho	Quant. Caixa Máster
10	0740101	100 unidades	5.000 unidades
11	0740201	100 unidades	5.000 unidades
12	0740301	100 unidades	5.000 unidades
15	0740401	100 unidades	5.000 unidades
20	0740501	100 unidades	5.000 unidades
21	0740601	100 unidades	5.000 unidades
22	0740701	100 unidades	5.000 unidades
23	0740801	100 unidades	5.000 unidades
24	0740901	100 unidades	5.000 unidades

Clique para ampliar



Entre em contato com nossa Equipe de Vendas:
Linha Hospitalar | Linha Farma

Entre em contato com nossa Equipe de Vendas:
Linha Hospitalar | Linha Farma

Descarpack - Efficiency in Disposables

São Paulo (11) 3649.5555 | Santa Catarina (47) 3343.8500 | SAC 0800.8784051

