



RELATÓRIO TÉCNICO

Relatório contém 4 páginas

LENÇOL HOSPITALAR DESCARTÁVEL PREMIUM DESCARBOX Isento de registro ANVISA

Responsabilidade Técnica:

Flávia Dalla Pria CRQ/Pr – nº 9201624

DATA: 28/05/2024

Descarbox Indústria e Comércio LTDA.
CNPJ:11.671.812/0001-85
Endereço: Rod. PR 317, 8.407 - Pq. Industrial
CEP: 87065-005 Cidade: Maringá - PR - Fone: (44) 3123-8700
E-mail: comercial@descarbox.com.br

1. IMAGEM DO PRODUTO:



2. MODELO COMERCIAL:

- Lençol Hospitalar Descarbox Premium **50cm X 50m**.
CÓD:449 **EAN13:** 7898951599666
- Lençol Hospitalar Descarbox Premium **70cm X 50m** .
CÓD:450 **EAN13:** 7898951599673

3. FORMAS DE APRESENTAÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO:

Embalagem primária: 1 unidade do produto, embalados em plástico BOPP (Polipropileno Biorientado); Embalagem secundária: 10 unidades do produto, embalados em caixas de papelão.

- Lençol Hospitalar Descarbox Premium **50cm X 50m** – 10 unidades;
Medidas: 515x155x375mm;
EAN14: 17898951599663
- Lençol Hospitalar Descarbox Premium **70cm X 50m** .
CÓD:450 **EAN13:** 17898951599670

4. COMPOSIÇÃO:

Papel fabricado a partir de fibras celulósicas virgens, enrolado em bobinas nas medidas de

Descarbox Indústria e Comércio LTDA.
CNPJ:11.671.812/0001-85
Endereço: Rod. PR 317, 8.407 - Pq. Industrial
CEP: 87065-005 Cidade: Maringá - PR - Fone: (44) 3123-8700
E-mail: comercial@descarbox.com.br



50cmX50m e 70cmX50m com gramatura de 19 a 26 g/m². É isento de substâncias alergênicas, sem furos, manchas, rasgos e outros defeitos. O produto forma uma barreira física para contribuir com a limpeza e higiene do ambiente, além dos lençóis descartáveis oferecerem segurança para os clientes em ambientes de alta rotatividade de pessoas.

5. INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Seguir as orientações, suficientes e adequadas para o uso ou aplicação correta e segura do produto:

Utilização do Lençol:

1. Retirar o lençol de sua embalagem original;
2. Desenrolar a quantidade de papel suficiente para cobrir a área desejada;
3. Ajustar as pontas do lençol de acordo com o tamanho do colchão, divã, cama ou maca;
4. Após procedimento no qual foi utilizado o lençol, o mesmo deverá ser descartado em local apropriado.

6. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO /MECANISMO DE AÇÃO/MODO DE USO:

A Família de Lençóis "Lençol Descarbox", são descartáveis e usados como roupa de cama hospitalar para cobertura de colchão, maca ou mesa para exames, em ambiente médico hospitalar, estéticas e afins. Atua como barreira de proteção entre a superfície de contato de acomodação e o paciente, evitando possíveis contaminações entre os mesmos.

7. ARMAZENAMENTO, VALIDADE E TRANSPORTE:

O produto deve ser armazenado em embalagem original, em local limpo, fresco e seco, evitando-se calor excessivo com exposição direta ao sol ou luz fluorescente, umidade e vapor, deve ser manipulado a temperatura ambiente, evitar colocar peso sobre as caixas coletivas. Temperatura máxima de 23 °C e mínima N/A, umidade máxima de 50% UR e mínima N/A. O produto em sua embalagem original lacrada, tem validade de 5 anos após a data de fabricação. Após o uso o mesmo deve ser descartado em local

Descarbox Indústria e Comércio LTDA.
CNPJ:11.671.812/0001-85
Endereço: Rod. PR 317, 8.407 - Pq. Industrial
CEP: 87065-005 Cidade: Maringá - PR - Fone: (44) 3123-8700
E-mail: comercial@descarbox.com.br



apropriado.

O transporte do produto deve ser realizado com a caixa em pé, sem deitar, posiciona-la de lado e outros. Seguir instruções de embalagens.

8. NORMAS

ABNT NBR 15464-15:2023 – Errata 1:2023, ABNT NBR 15134:2020; NBR 5426/1985;

9. NCM

NCM:48030090.

10. HISTÓRICO DAS REVISÕES

Emissão	Revisão	Descrição das principais alterações
02/04/2025	0.4	Adição da validade e correções ortográficas
28/05/2024	0.3	Atualização de normas do produto.
06/12/2023	0.2	Inclusão de código de barras e dimensões da embalagem.
10/03/2023	0.1	Revisão das informações do relatório.