

LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL

LÁTEX COM 50 - LIVE



DESCRIÇÃO

As Luvas Cirúrgicas Estéreis Látex Live têm como finalidade atuar como barreira de proteção biológica durante procedimentos invasivos, de alto risco ou cirurgias, proporcionando aos profissionais segurança, resistência e conforto. Por formarem uma barreira física, contribuem para a redução dos riscos de contaminação.

Trata-se de um Equipamento de Proteção Individual (EPI), fabricado em látex natural, nas apresentações com e sem talco, estéril e de uso único. São acondicionadas em envelope plástico ou papel monolúcido com dupla embalagem, seguindo técnica asséptica, com separação dos lados direito e esquerdo e abas que facilitam o calçamento.

INDICAÇÃO DE USO

As Luvas Cirúrgicas Estéreis Látex Live têm a função de proteger a pele íntegra das mãos dos profissionais de saúde, atuando como parte da vestimenta cirúrgica essencial para a manutenção das técnicas assépticas durante os procedimentos cirúrgicos.

COMPOSIÇÃO

Borracha de Látex Natural

VALIDADE

05 anos.

APRESENTAÇÃO

Pacote individual contendo um par de luvas, cartucho com 50 pares, caixa de embarque com 500 pares.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Utilize luvas do tamanho adequado para suas mãos, garantindo conforto e segurança durante o procedimento.
2. Evite tocar superfícies com luvas já contaminadas, prevenindo riscos de disseminação de agentes infecciosos.
3. Para a remoção das luvas, vire-as do avesso, de modo a evitar contato com a parte externa. Certifique-se de que a nuca e as orelhas estejam completamente cobertas.
4. Após o uso, remova e descarte as luvas em recipiente apropriado para resíduos infectantes.
5. Higienize as mãos sempre antes e depois do contato com pacientes ou materiais potencialmente contaminados.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Atenção: este produto contém látex de borracha natural. Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
- Indicado para uso em procedimentos cirúrgicos e estéreis;
- Ao vestir as luvas, utilize sempre técnica asséptica;
- O uso de anéis, unhas compridas ou acessórios pode provocar o rompimento do material;
- Inspeção as luvas antes da utilização para verificar a presença de defeitos ou imperfeições;
- Utilize luvas sempre que houver possibilidade de contato com sangue, fluidos corporais, membranas mucosas, artigos contaminados ou em procedimentos invasivos;
- Certifique-se de que as luvas são adequadas ao uso pretendido, considerando que as condições do local de trabalho podem diferir dos ensaios laboratoriais, especialmente em relação a temperatura, abrasão e degradação;
- Não reutilize. Luvas usadas não devem ser lavadas nem reprocessadas;
- Em caso de rasgo ou furo durante o procedimento, a luva deve ser imediatamente descartada e substituída;
- Utilize luvas do tamanho correto para suas mãos;
- As luvas devem ser verificadas quanto à integridade antes e depois do uso;
- O produto pode reduzir a sensibilidade tátil e a capacidade de preensão;
- Conservar protegido de calor, luz e umidade;
- Produto de uso único;
- Proibido reprocessar.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

As embalagens do produto devem ser armazenadas e transportadas em temperaturas entre 4°C e 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz solar e umidade. A validade é assegurada enquanto a embalagem permanecer íntegra e dentro do prazo estabelecido no rótulo. Para garantir essa condição, é essencial seguir corretamente as orientações de armazenamento e transporte.

Descrição	Fabricante	Notificação Anvisa	C.A
Luva Cir. Est. Látex Sem Pó	TG Medial	80630310012	47013
Luva Cir. Est. Látex Com Pó	TG Medical	80630310013	47012
Luva Cir. Est. Látex Sem Pó	Guilin HBM Healthcare Protections	80630319005	52416
Luva Cir. Est. Látex Com Pó	Guilin HBM Healthcare Protections	80630319006	52324