



MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO

LUVA DE VINIL PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO SEM PÓ



Nome técnico: Luvas descartáveis

Nome comercial: Luva de vinil para procedimento não cirúrgico sem pó

Importador:

INOVEN COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.

Rua João Thomaz Pinto, 1570, Galpão 1, Módulo 1, Condomínio Byblos, Canhanduba

CEP: 88.313-045 – Itajaí/SC

CNPJ: 07.826.504/0001-04

Responsável técnica: Carolini Gardini

CRF/SC: 12011

Cadastro do produto perante ANVISA: 82090610016

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luva para procedimento não cirúrgico em policloreto de vinila (vinil) sem pó, de uso único, ambidestra, superfície lisa, não estéril, atóxica, apirogênica, uso único.

2. INDICAÇÕES DE USO

A luva para procedimento não cirúrgico de vinil sem pó é indicada para proteção das mãos dos profissionais da saúde em procedimentos não invasivos, para prevenir a contaminação cruzada entre usuários e pacientes durante procedimentos médicos onde não haja o contato com fluidos corporais passíveis de contaminação.

3. INSTRUÇÕES DE USO

Para utilização do produto, realizar assepsia prévia das mãos; Calçar as luvas cuidadosamente com as mãos secas; Executar o procedimento; Após o uso, retirar a luva descartando-a imediatamente em local para materiais potencialmente contaminados; Não reutilizar ou esterilizar a luva após seu uso.



4. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Produto destinado à barreira biológica, não utilizar como barreira química;
- Produto de uso único;
- Produto não estéril;
- Destruir após uso;
- Proteja este produto do calor, da umidade e da luz;
- Produto isento de látex;
- Proibido reprocessar;
- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada;
- Eliminar o produto em recipiente adequado, de acordo com a legislação federal, estadual e municipal vigente. Pode ser incinerado por empresas adequadas e regulamentadas, desde que os regulamentos sejam respeitados;
- Não utilizar após o prazo de validade;
- Evitar exposição de fontes de calor em todo o tempo;
- Descartar o produto se apresentar buracos, quando em contato com bordas afiadas.

5. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Armazenar e transportar em local protegido do calor, umidade e luz, protegendo da exposição direta do sol e da luz UV.

6. VALIDADE

05 anos após a data de fabricação – caso não haja violação da embalagem.

7. IMAGENS DO PRODUTO

Imagem 01: Luva de vinil para procedimento não cirúrgico sem pó.





8. ROTULAGEM

Embalagem primária: em papel cartão contendo 100 unidades de luvas.

Embalagem secundária: em caixa de papelão contendo 10 cartuchos de embalagem primária cada, totalizando 1000 unidades.