

DADOS TÉCNICOS

- Cilindro transparente confeccionado em polipropileno;
- Matéria-prima inerte,
- Estéril;
- Para uso manual;
- Lubrificadas, garantindo um movimento suave do êmbolo e reduzindo a pressão exigida durante a manipulação do dispositivo;
- Embaladas individualmente em filme termoplástico e em papel grau cirúrgico;
- A Seringa Hipodérmica Descartável Descarpack é indicada para aplicação de medicamentos pelas vias subcutâneas, intradérmicas, intramuscular ou endovenosa, e em diferentes formas farmacêuticas, podendo ser: veículos aquosos, veículos oleosos, pó em suspensão e pó para ressuspender/reconstituir;
- A Seringa Hipodérmica Descartável Descarpack atende as normas ABNT NBR ISO 7886-1:2020, ABNT NBR ISO 594-1:2003, a Portaria do INMETRO nº 503 de 29 de dezembro de 2011 e resolução RDC nº 27 de 14 maio de 2014.

MODELOS DISPONÍVEIS

Seringa Hipodérmica Luer Slip Descarpack

Modelo

1 mL

3 mL

5 mL

10 mL

20 mL

Seringa Hipodérmica Luer Lock Descarpack

Modelo

3 mL

5 mL

10 mL

20 mL

MODELOS CADASTRADOS

Seringa Hipodérmica Luer Slip Descarpack

Modelo

1 mL

3 mL

5 mL

10 mL

20 mL

60 mL

Seringa Hipodérmica Luer Lock Descarpack

Modelo

3 mL

5 mL

10 mL

20 mL

60 mL

INSTRUÇÕES DE USO

1. Lave as mãos antes de preparar a injeção;

2. Abra a embalagem da seringa utilizando o local correto de abertura;
3. Conecte a agulha de tamanho e calibre apropriado;
4. Retire o protetor da agulha e aspire o medicamento;
5. Realize anti-sepsia do local da aplicação com algodão e álcool 70%;
6. Ao final da injeção, descarte a seringa em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Verificar cuidadosamente a integridade de cada embalagem primária antes do uso;
- Não utilizar caso a embalagem primária esteja violada;
- Produto esterilizado com Óxido de Etileno;
- Proibido reprocessar;
- Validade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada;
- Produto médico-hospitalar de uso único;
- Após o uso descartar em local apropriado.

CONTRAINDICAÇÕES

Não aplicável

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO

Não informamos métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de reprocessamento proibido de acordo com a RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser feito imediatamente após a utilização. Sugere-se o descarte do produto em recipiente próprio para perfurocortantes (grupo E de acordo com a RDC 222/2018).

INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Fabricante: Lifelong Meditech Limited

Importado e Distribuído por: Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda

Notificação Anvisa: 10330669025

Responsável Técnica: Beatriz Poleza – CRQ: 13101190